

"PF75"

BABYWAAGE

CAE GOLD

Spezifikationen / Technische Eigenschaften	
Wägebereich / Genauigkeit:	15kg / 5g < 10kg > 10g
Grundstruktur Gestell:	Verstärkter Duroplast
Standardfunktionen:	- RESET (Tara), HOLD, REFRESH, MEM - Nullstellung (automatisch, ...) - Automatische Abschaltung - Speicherung der Wiegedaten - Trittfest
Elektronisches Anzeigergerät:	Im Gestell integriert
Anzeige:	LCD-Digitalanzeige
Stromversorgung:	Lithiumbatterie (alternativ Netzstecker)
Weitere wichtige Merkmale:	Hygiene – Ergonomie – Sicherheit
Sehr Wiegefläche:	54 cm x 25 (30) cm (L / B)
Maße und Gewicht:	55 cm x 36 cm x 12 cm (L / B/ H) / 6kg
T° / HR :	0°C ... 40°C / <85%HR
Bauweise :	IP65 (Front) / IP42 (gesamt)
Herstellergarantie:	2 Jahre
Optionen	
Wägebereich / Genauigkeit:	15kg / 5g
Messstab:	Elektronisch oder mechanisch
Komfort:	Kissen in Plattform integriert

Unter Einsatz von **modernster Technologie** und **Materialien** wie verstärktem Duroplast gelang es **CAE**, mit „PF75“ ein Spitzenprodukt herzustellen, das in Bezug auf **Ergonomie, Robustheit, Hygiene** und **Design** den allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. Der eingesetzte Kunststoff ist absolut **pflegeleicht** und lässt sich im Handumdrehen reinigen.

Zuverlässig, präzise und **einfach** in der Handhabung: Die neuen **elektronischen Spitzenmodelle** wurden an die speziellen Bedürfnisse von Patienten und medizinischen Pflegekräften angepasst. **Schon nach drei Sekunden wird ein präzises Messergebnis angezeigt und der Wiegevorgang wird durch ein „Tonsignal“ beendet.** Die Gewichtsangabe bleibt bis zum nächsten Wiegevorgang gespeichert. Die Geräte sind standardmäßig mit folgenden Funktionen ausgestattet:

- **RESET: Neustart der Messung** mit automatischer Nullstellung, auch wenn die Waage gerade belastet ist (erlaubt die Ermittlung des Nettogewichts)
- **HOLD: Daueranzeige des Gewichts** während des gesamten Wiegevorgangs, sobald die Stabilisierung erfolgt ist
- **REFRESH: Neustart des Wiegevorgangs (HOT), ohne dass das Baby von der Waage genommen** und/oder eine Stabilisierung der Anzeige (FST) (Trittschutz) vorgenommen werden muss
- **MEM: Anzeige eines gespeicherten** wiegeresultats.

Stromversorgung per Standard-Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten) oder wahlweise über Netzstecker. Der geringe Stromverbrauch der Waage gewährleistet einen langen Batteriebetrieb auch bei mehreren tausend Wiegevorgängen. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch oder manuell.

Diese **Babywaage** wurde von **CAE** zudem mit einem **elektronischen Messstab** mit **Digitalanzeige** ausgestattet. **Schnell einsatzbereit, einfach** zu bedienen, hohe **Genauigkeit** – ein Modell mit vielen Vorteilen!

Fremdkörper- und Wasserschutz.

„PF75“, ein Modell der Produktlinie „GOLD“ der Marke **CAE**, ist eine **qualitative hochwertige Babywaage** für den **professionellen Einsatz im medizinischen Bereich**.

Optionen:

- Für erhöhten **Babykomfort** steht ein in die Wiegeplatte **integriertes Kissen** zur Verfügung.
- Eine **Genauigkeit** von 5 g im Bereich von 0 bis 15 kg ist ebenfalls möglich.
- Zwei Arten von Messstäben stehen zur Verfügung; ein **elektronischer Messstab** mit **Digitalanzeige** oder ein **mechanischer Messstab**. Beide decken standardmäßig den Bereich von 40 bis 65 cm ab (optional 35 bis 60 cm).

Vertrieb :



Besuchen Sie unsere Internetseite

CAE 1
AT THE TOP OF PROFESSIONAL WEIGHING

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er für nützlich hält.

CE M II
Entspricht den Richtlinien CE
Nr. 90 / 384 / EWG
Nr. 93 / 42 / EWG

V2.1 - 060918 DE

Hersteller : C.A.E. s.a. Trèfontaines, 9 B 6970 TENNEVILLE - BELGIEN
Tel: +32 (0) 84 45 57 70 - Fax : +32 (0) 84 45 60 77 www.cae.be e-mail : info@cae.be